



商品特徵



赤外線センサーで 手を触れず衛生的






温度が計れます

TOAMIT:

噴出量調節可能

シチュエーションに合わせて、 噴出量を大、小に調節可能です。

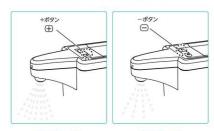

噴出量:大

噴出量:小 一回あたり約1.6~1.9ml 一回あたり約0.9~1.2ml



TOAMIT:

2 in 1









TOAMIT:

本体各部説明 トップカバー 電源スイッチ/噴射量調節 温度検知モニター 温度検知センサー スプレー噴射口 スプレー噴射センサー タンク ※センサーから 3~5cmが感知範囲 600ml 大容量! 乾電池収納ケース ※単三電池4本(別売)

TOAMIT:

仕 様

THERMO FRESH	タンク容量	600ml
約W83 * D163 * H210mm	本体材質	ABC、PC、TPE
単三電池×4本 (別売)	本体質量	約550g

仕様

- 電源:DC6V 単3形電池 4本
- サイズ:約83mmX163mmX210mm

約3000回使用可能

- 質量:約550g
- タンク容量:約600ml
- 本体材質:ABS+PC+TPE
- 測定精度:±0.5°C
- 測定範囲:35° C-43° C
- ※本製品に付属している温度計は、表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病にり患しているかどうか を診断する機器ではありません。
- ※本製品はディスペンサーのみです。除菌液は別途市販のものをご使用くださいませ

ご使用上のご注意

- ◆ 体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温針での体温剤定や医師による診断を行ってください。
- 本来の用途以外使用しないでください。
- 手以外の箇所には使用しないでください。
- 本機を分解または改造しないでください。
- タンク内には指定の液体以外は入れないでください。
- 湿気の 多い場所、雨や水がかかる場所、厨房や工場などの油や油煙が発生する場所、ほこりや金属粉の多い場所な どのような場所では使用しないでください。
- 唐射日光が当たる場所、勝層器具や火気の近くに置かないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所には設置しないでください。
- 強い振動や、衝撃を加えない、振動、衝撃のある場所には設置しないでください。
- 電池が液潤れした場合は、直接液体に触れないでください。液体が体や衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症や怪我がある場合は、匿ちに医師にご相談くだ
- 電池の液が目に入ったときは、こすらず、大量の水で洗い流し、すぐに病院に行き治療を受けてください。
- 指定以外の乾電池は使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの極に注意して、正しく取り付けてください。
- ・ 乾電池を使い切った場合や長期間使用しない場合は、本機から取り外してください。
- 乾電池交換の原は新旧の乾電池、異なるタイプの乾電池を選ぜないでください。
- 量池に表示されている注意事項を併せてお読みください。
- 本機が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を達し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭くと変形や変色のおそれである。
- 環境を保護するために、使用済みの乾電池は、居住地域の規制に従って廃棄またはリサイクルする必要があります。

